


| | |
|----------------|-------------------------------|
| KOD KATALOGOWY | AM-OSN-U-12 |
| NAZWA HANDLOWA | ORTEZA NADGARSTKA |
| MODEL | ORTEZA NADGARSTKA AM-OSN-U-12 |
| CODE | AM-OSN-U-12 |
| TRADE NAME | WRIST ORTHOSIS |
| MODEL | WRIST ORTHOSIS AM-OSN-U-12 |



1. PL: Rozepnij ortezę i wyjmij usztywnienie kciuka (1).

EN: Unfasten the brace and remove the thumb support (1).

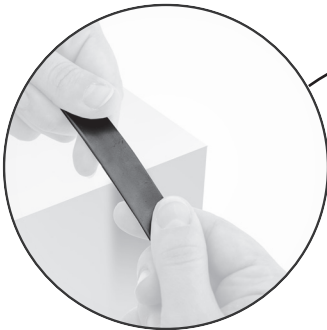

2. PL: Uformuj usztywnienie według wskazań terapeutycznych i umieść w ortezie.

EN: Shape the splint according to therapeutic indications and place it in the brace.



3. PL: Załóż ortezę na rękę.


UWAGA! Przed założeniem wyrobu pacjentowi, należy precyzyjnie dopasować usztywnienie zainstalowane w ortezie, w celu uzyskania pożądanego ustawienia zabezpieczonego stawu.

EN: Put on the brace on your hand.

ATTENTION! Before putting the brace on, the splint installed in the brace should be precisely adjusted to the patient in order to obtain the appropriate setting of the protected joint.



- 4. PL:** Ustaw odpowiednie napięcie pasów i zapnij rzepy (2,3).
 Jeżeli istnieje potrzeba skrócenia pasków, odetnij ich zbędną długość.
EN: Set the proper tension of the belts and fasten the Velcro fasteners (2,3).
 If there is a need to shorten the straps, cut off the excess length.

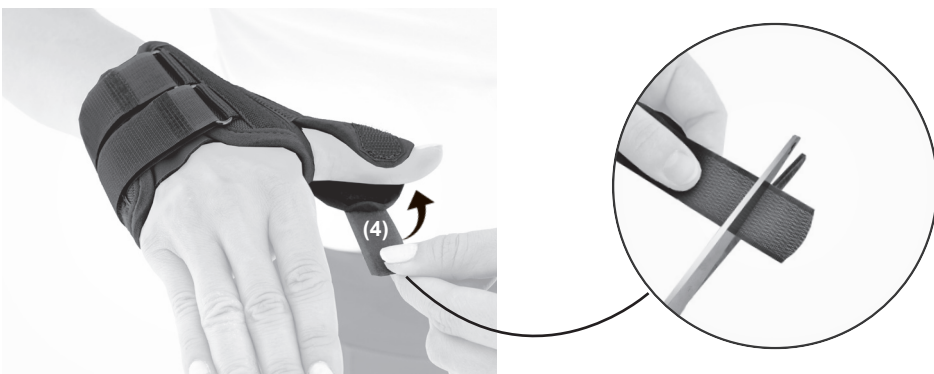

- 5. PL:** Zapnij rzep obwodowy kciuka (4). Jeżeli istnieje potrzeba odetnij nadmiar rzepa.
EN: Fasten the thumb circumferential Velcro (4). If there is a need shorten the straps.



- 6. PL:** Gotowy wyrób.
EN: Product is ready to use.