




KOD KATALOGOWY	AM-PES-01
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA PLECÓW
MODEL	AM-PES-01
CODE	AM-PES-01
TRADE NAME	UPPER BACK BRACE
MODEL	AM-PES-01

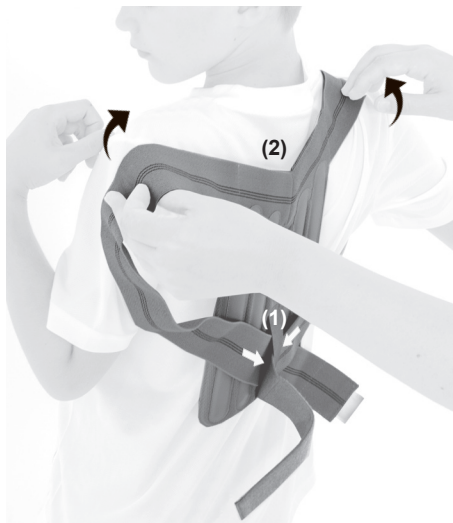

- 1. PL:** Przepleć paski przez szlufkę (1) i załóż ortezę na ramiona (2).
EN: Interlace the straps through the loop (1) and place the brace over the shoulders (2).

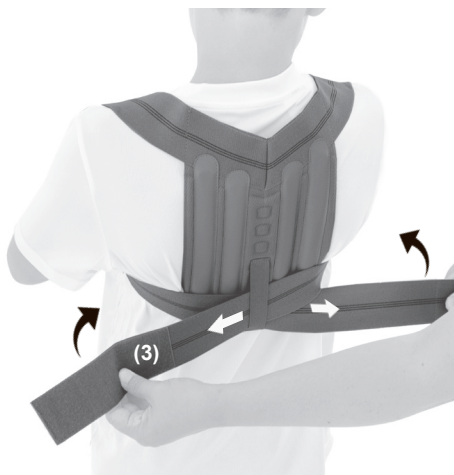

- 2. PL:** Ustaw odpowiednią kompresję podciągając szelki (3).
EN: Set the required level of compression by pulling the straps (3).

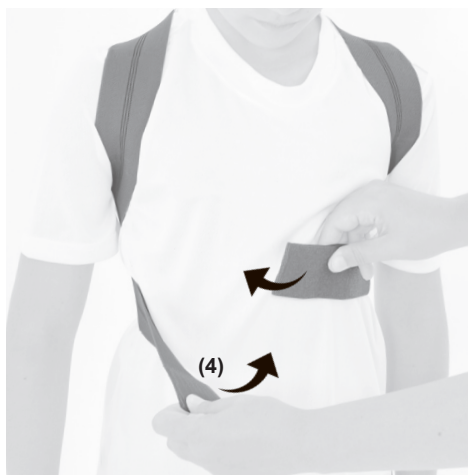

- 3. PL:** Zapnij przednią część ortozy na rzep (4).
EN: Attach the front Velcro closure (4).



- 4. PL:** Gotowy wyrób.
EN: Product is ready to use.