

KOD KATALOGOWY	AM-SX-04
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA KOSTKI
MODEL	ORTEZA KOSTKI AM-SX-04
CODE	AM-SX-04
TRADE NAME	ANKLE ORTHOSIS
MODEL	ANKLE ORTHOSIS AM-SX-04



A. ŁUSKI O ŚREDNIM STOPNIU STABILIZACJI
A. SOFT STABILIZATION SHELLS



B. ŁUSKI O MOCNYM STOPNIU STABILIZACJI
B. STRONG STABILIZATION SHELLS



PL: Rozepnij ortezę. Jeśli istnieje potrzeba, wymień łuski. W tym celu odepnij rzepy zabezpieczające boczne kieszenie (1) i wsuń w nie usztywnienia (A). Następnie zapnij rzepy.

EN: Unfasten the brace. If necessary, change the shells. To do this, unfasten the Velcro fasteners securing the side pockets (1) and put the stiffeners (A) into them. Then fasten the Velcro.




1. PL: Załóż ortezę (2) na nogę i zasuń zamek (3).

EN: Put the brace (2) on the leg and close the zipper (3).



- 2. PL:** Przelóż taśmę pod stopą, a następnie przepleć przez szlufkę (4).
EN: Pass the strap under the foot and interlace it through the belt loop (4).

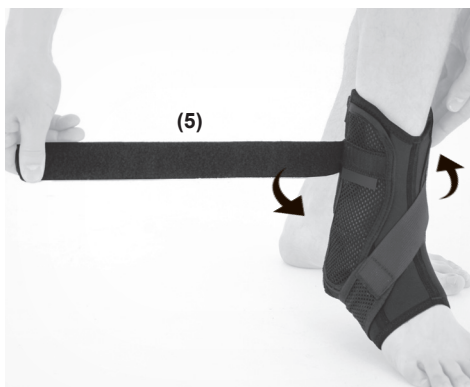

- 3. PL:** Zapnij pas ATFL (5) oplatając go wokół nogi we wskazanym kierunku i przypnij go do rzepa (6).
EN: Close the ATFL strap (5) wrapping it around the leg in the indicated direction and fasten it to the Velcro (6).



- 4. PL:** Gotowy wyrób.
EN: Product is ready to use.