



KOD KATALOGOWY	FIX-KG-22
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA KOŃCZYNY GÓRNEJ
MODEL	FIX-KG-22
CODE	FIX-KG-22
TRADE NAME	UPPER-EXTREMITY SUPPORT
MODEL	FIX-KG-22

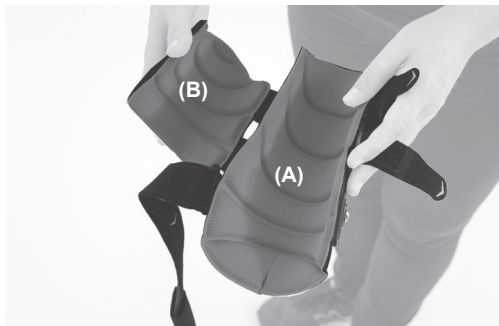

- 1. PL:** Przed założeniem ortozy rozepnij, a w taki sposób, aby łuski (A,B) były połączone z jednej strony.
EN: Before putting on the brace, open it so that the shells (A,B) are connected on one side.




- 2. PL:** Umieść łuskę ortozy (A) na ramieniu.
EN: Place the shell (A) on your upper arm.

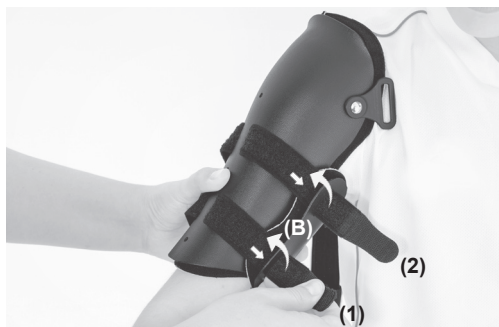

- 3. PL:** Umieść łuskę ortozy (B) po przeciwnej stronie ręki. Przepleć pasy (1,2) przez otwory dopasowując ortezę do kończyny.
EN: Place the shell (B) on the opposite side of your hand. Thread the straps (1,2) adjusting the orthosis to the limb.



- 4. PL:** Zapnij rzepy (3,4) w podanej kolejności.
EN: Close the Velcros (3,4) according to the following steps.

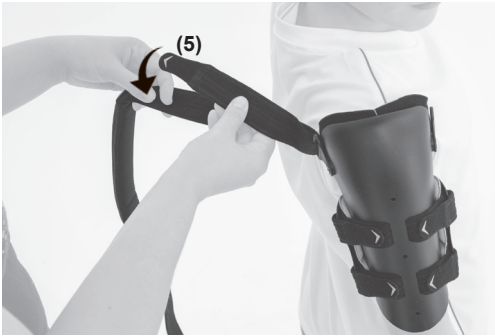

- 5. PL:** Ustaw odpowiednią długość pasa obwodowego (5). Umieść osłonę pasa (6) w odpowiednim miejscu.
EN: Set the correct length of the circumferential strap (5). Place the belt cover (6) in the correct place.



- 6. PL:** Zapnij pas (7) na rzep.
EN: Fasten the Velcro strap (7).



- 7. PL:** Gotowy wyrób.
EN: Product is ready to use.